

REINIGUNG NACH DEM GEBRAUCH

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie es rund 10-15 Minuten abkühlen. Entfernen Sie die Gesichtssauna/den Dampf-Inhalator durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn vom Gerät.

Gießen Sie Wasserreste, die sich noch im Wasserbehälter befinden, in den Abguss.

Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen. **Nicht in Wasser eintauchen. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder scheuernden Reiniger.**

KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie Fragen oder Schwierigkeiten haben, kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter: **01242 702345** oder senden Sie uns eine E-Mail an: **online@riobeauty.com**.

Für Nachbestellungen von Zubehörteilen besuchen Sie uns im Internet auf **www.riobeauty.com** oder setzen Sie sich mit Ihrem nationalen Anbieter in Verbindung.

GARANTIE

Registrieren Sie Ihre Zwei-Jahres-Garantie unter: **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**

ENTSORGUNG

Die Elektro- und Elektronik-Geräteabfall-Richtlinie (WEEE) (2012/19/EU) ist in Kraft, um die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien zu nutzen, so dass gefährliche Substanzen aufbereitet werden und der Einfluss auf die Umwelt minimiert und ein Anwachsen der Mülldeponien verhindert wird. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert, daher stellen Sie bitte sicher, dass dieses Produkt am Ende des Produktlebenszyklus ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.



Ende des Produktlebenszyklus ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Die Reinigung und Wartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Gerätemissbrauch kann Schäden zur Folge haben.
- Dieses Produkt darf nur für den bestimmungsgemäßen, in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Gebrauch eingesetzt werden.
- Es befinden sich keine Teile innerhalb des Geräts, die Sie selbst warten können.

TECHNISCHE DATEN

Eingangsleistung: 230 V AC ~ 50 Hz 150 W



Dieses Gerät entspricht den aktuellen Produktvorschriften.



Dieses Produkt ist nicht für das Badezimmer geeignet, da es nicht wasserfest ist.

- Dieses Produkt NICHT unter fließendes Wasser halten.
- NICHT bei Schnittverletzungen oder rissiger Haut anwenden.
- Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind, hohen oder niedrigen Blutdruck haben, unter Herzkrankheiten oder Durchblutungsstörungen leiden. Wenden Sie sich vor dem Gebrauch an Ihren Arzt, wenn Sie unter Diabetes, einer Leberkrankheit oder Schilddrüsenproblemen leiden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT auf Narben, verletzter Haut, Aknepusteln oder entzündeter Akne, Ekzemen mit Hautschäden, geschädigter, entzündeter oder erkrankter Haut oder allen anderen Hauterkrankungen. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
- Nur äußerlich anzuwenden.
- Seien Sie bei der Benutzung einer Gesichtssauna vorsichtig, da Dampf Verbrennungen verursachen kann.
- Setzen Sie eine Gesichtssauna nicht als Luftbefeuchter ein.
- Verwenden Sie die Gesichtssauna nicht ohne Wasser.
- Platzieren Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe von Hitzequellen.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn es nicht völlig funktionsfähig ist oder nachdem es fallen gelassen oder beschädigt wurde.
- Es wird empfohlen, dass jede tägliche Behandlung auf Stufe 1 nicht länger als 20 Minuten dauert, um Hautreizungen oder -verbrennungen zu vermeiden.

GESICHTSSAUNA MIT DAMPF-INHALATOR



öffnet die Poren für eine gründliche Reinigung

 the beauty specialists


SICHERHEITSMASSNAHMEN

- **Bitte lesen Sie die vorliegenden Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.**
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 12 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedienung des Gerätes unter Aufsicht erfolgt, oder die Personen hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der möglichen Gefahren, die durch den Gebrauch entstehen können, eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Produkt NICHT in Wasser tauchen.

EINFÜHRUNG

Die Rio Gesichtssauna setzt Dampf ein, um die Poren zu öffnen und sorgt für eine gründlich gereinigte Haut, die sich weich, mit Feuchtigkeit versorgt und erfrischt anfühlt. Das Gerät beinhaltet eine Gesichtsmaske, eine Nasenmaske zum Inhalieren und einen Aufsatz zum Verdampfen von ätherischem Öl.

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

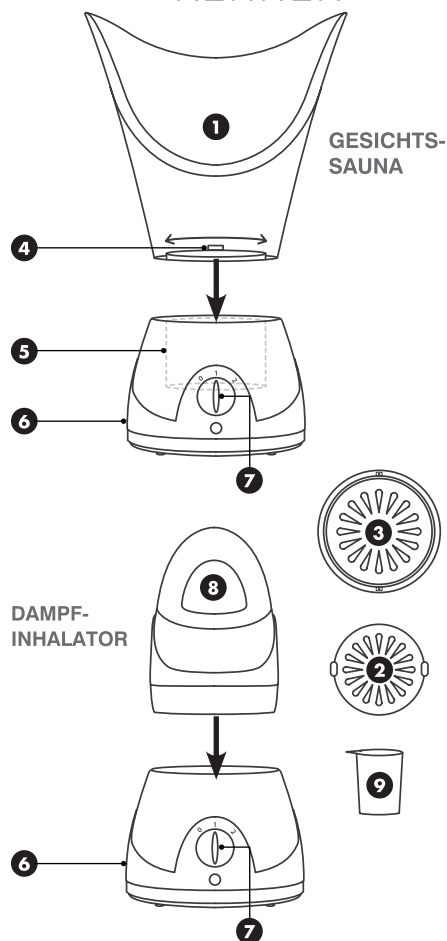

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 Gesichtssauna | 6 Haupteinheit |
| 2 Ölverdamper-Abdeckung | 7 Wärmeregler |
| 3 Ölverdamper-Aufsatz | 8 Dampf-Inhalator-Aufsatz – zum Befreien der Nase |
| 4 Dampfregler (hinten) | 9 Messbecher |
| 5 Wasserbehälter | |

ERSTE SCHRITTE

Vor dem ersten Gebrauch reinigen Sie die Innenseite des Wassertanks bitte mit einem feuchten Tuch.

SCHRITT 1

Stellen Sie das Gerät (6) unbedingt auf eine flache, sichere Oberfläche.



SCHRITT 2

Verwenden Sie den Messbecher (9), um den Wassertank (5) mit kaltem Wasser zu füllen. Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge (50 ml).

SCHRITT 3

Befestigen Sie den von Ihnen gewählten Dampfaufsatz (1 oder 8) an das Gerät (6).

SCHRITT 4

Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.



SCHRITT 5

Stellen Sie den Wärmeregler (7) auf **Stufe 2** und warten Sie etwa **2-3 Minuten**, bis sich das Wasser erwärmt hat.



SCHRITT 6

Wenn aus der Sauna oder dem Inhalator Dampf entweicht, stellen Sie den Regler auf **Stufe 1**, um die Dampfmenge aufrechtzuerhalten.

Um die Wärme oder Dampfmenge zu erhöhen, stellen Sie ihn wieder auf Stufe 2.

ANWENDUNG

EINSTELLEN DER DAMPFMENGE



Der Aufsatz der Gesichtssauna hat einen Dampfregler (4) mit dem Sie einstellen können, wie viel Dampf erzeugt wird. Er befindet sich hinten an der Gesichtssauna. Schließen Sie ihn, um die Dampfmenge zu reduzieren und öffnen Sie ihn, um die Dampfmenge zu erhöhen.

GESICHTSSAUNA

SCHRITT 1

Binden Sie vor dem Gebrauch Ihr Haar zurück und entfernen Sie Ihr Make-up.




SCHRITT 2

Legen Sie Ihr Gesicht an den Rand der Gesichtssauna (1).

SCHRITT 3

Schließen Sie Ihre Augen und entspannen Sie sich, während der Dampf Ihre Poren durchdringt. **Wenn Ihnen zu warm wird, schließen Sie den Dampfregler oder entfernen Sie sich etwas von der Gesichtssauna.**

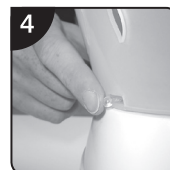

SCHRITT 4

Bei einer maximalen Befüllung reicht der Dampf 20 Minuten. Wir raten Ihnen davon ab, das Gerät länger zu benutzen.

Tipp: Um die Wirkung der Behandlung zu erhöhen, spülen Sie Ihr Gesicht danach mit kaltem Wasser ab und cremen Sie es dann ein.

ANWENDUNG

DAS VERDAMPFEN ÄTHERISCHER ÖLE

Fühlen Sie sich wie in einem luxuriösen Spa und genießen Sie mit dem Ölverdampfer-Aufsatz (3) die Aromatherapie zuhause. Geben Sie dazu einige Tropfen ätherisches Öl auf einen Wattebausch oder in den Wasserbehälter.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät abgeschaltet ist, wenn Sie das Öl hinzufügen.



Mit einem Wattebausch: Geben Sie ein paar Tropfen des Öls Ihrer Wahl auf einen Wattebausch.

Legen Sie ihn dann auf den Ölverdampfer-Aufsatz (3).



Befestigen Sie die Ölverdamper-Abdeckung (2), die mit einem Klick einrastet.

Sie können stattdessen auch ein paar Tropfen Ihres ätherischen Öls in den Wasserbehälter geben. Das Wasser und die ätherischen Öle verdampfen.

DAMPF-INHALATOR-AUFSATZ

Passt über die Nase und den Mund und eignet sich ideal, um die Nase zu befreien.



Stellen Sie den Wärmeregler (7) auf **Stufe 2** und warten Sie etwa **2-3 Minuten**, bis sich das Wasser erwärmt hat. Stellen Sie den Regler dann zurück auf **Stufe 1**, um die Dampfmenge aufrechtzuerhalten.

Stecken Sie Ihre Nase in den Dampf-Inhalator-Aufsatz.

Schließen Sie Ihre Augen, entspannen Sie sich und atmen Sie normal. **Wenn sich der Dampf zu heiß anfühlt, entfernen Sie sich etwas.**